



# Manuel d'utilisation



## Chaise de Transport

Mise en service:

Avertissement - cette chaise est conçue pour le transport de personnes. Elle ne doit pas être laissée sans surveillance dès qu'elle est en service. Il est recommandé que tous les utilisateurs aient suivi une formation. Cette chaise nécessite au minimum 2 personnes pour être utilisée dans les escaliers.



1. Prenez la chaise de sa zone de rangement et posez-la à plat sur le sol.



2. Déverrouillez la ceinture de sécurité.



9. Parvenu à un palier, reposez la chaise sur ses 4 roues et dirigez-vous vers la volée de marches suivante.



10. Dès que vous arrivez au rez-de-chaussée, dirigez-vous vers l'issue de secours.

RETOUR DE LA CHAISE A SA POSITION DE RANGEMENT



3. Dépliez la poignée et insérez les goupilles de sécurité de chaque côté.




4. Tenez la poignée et insérez la barre du siège dans le support sur l'arrière du châssis.



5. Transférez la personne sur le siège en s'assurant que son poids correspond bien à la capacité maximale du siège.



1. Refermez le repose-pieds dans sa position initiale.

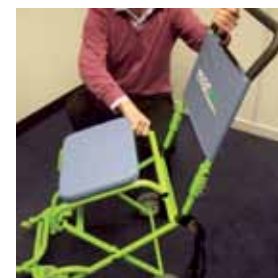

2. Tenez la poignée et ôtez la barre du siège dans le support.



3. Ôtez les goupilles de chaque côté de la poignée, et repliez la poignée.



6. Si nécessaire, dépliez le repose-pieds et bouclez la ceinture de sécurité.



7. Au bord de l'escalier, 1 personne doit tenir la poignée arrière et 1 ou 2 personnes doivent saisir les poignées de portage à proximité du repose-pieds.



8. 1 personne doit prendre le commandement et donner les instructions pour lever. Manœuvrez la chaise lentement et horizontalement dans les escaliers.



4. Positionnez la chaise au sol afin de faciliter son repliage sur l'arrière du châssis.



5. Bouclez la ceinture de sécurité autour de la chaise.



6. Remplacez la chaise dans sa position de stockage.